

ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DES USB-KABELTREIBERS FÜR IHR WELLION BLUTZUCKERMESSGERÄT

Schritt 1

Rufen Sie Ihren gewohnten Internetbrowser auf.

Setzen Sie den hier angegebenen Link www.wellion.eu in die Adressleiste ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Sie können aber auch gleich auf den folgenden Link klicken: <https://www.wellion.eu/en/service/downloads-links>

Schritt 2

Um zum Seitenabschnitt mit diversen Treibern zu gelangen, haben Sie 2 Möglichkeiten:

Option 1

SCROLLEN

Scrollen Sie bis zum Abschnitt **USB KABELTREIBER**. Wählen Sie den Treiber für Ihr Wellion Blutzuckermessgerät aus und klicken Sie auf diesen. Die gewünschte Datei wird heruntergeladen.

Option 2

SUCHEN

Nachdem Sie über den Link die Seite aufgerufen haben, drücken Sie die Tastenkombination „Strg“ und „F“, um die Suchfunktion aufzurufen → ein Suchfeld öffnet sich. Geben Sie im Suchfeld den Begriff **USB** ein. Der Cursor springt automatisch zum gesuchten Abschnitt. Wählen Sie den entsprechenden Treiber für Ihr Wellion Blutzuckermessgerät aus und klicken Sie auf diesen. Die gewünschte Datei wird heruntergeladen.

Schritt 3

Öffnen Sie die heruntergeladene Datei. (Falls es eine ZIP-Datei ist, bitte entpacken Sie diese.)

Starten Sie die Installation des USB-Kabel-Treibers indem Sie die .exe Datei starten. Die notwendigen Komponenten (Treiber) werden installiert. Starten Sie Ihren PC/MAC neu, um die Installation abzuschließen.

Sie können sofort die Messdaten aus den Wellion Blutzuckermessgeräten schnell und einfach übertragen.

Hinweis:

Die Datenübertragung ist nur mit einer separat erhältlichen Software möglich. Eine Übersichtsseite finden Sie unter <https://wellion.eu/produkte/blutzuckermessgeraete/wellion-sidiary-tagebuch-app>

Diabass Software ([zur Hersteller-Website](#)) SiDiary Software ([zur Hersteller-Website](#))

